



*Ruhen & Schlafen  
in der Pflege*

Interaktive E-Book-Schulung:  
[www.thomashilfen.de/305](http://www.thomashilfen.de/305)



# Schlaf-Therapie für Körper & Geist

## Thevo Therapie-Matratzen



## Der Schlafexperte für Reha & Pflege



### 60 Jahre Erfahrung

...in der Entwicklung von Schlafsystemen machen die Thomas-Unternehmensgruppe zu einem international anerkannten Spezialisten für den erholsamen Schlaf.



### Studien

...und viele Erfahrungsberichte betroffener Menschen bestätigen den positiven Effekt der Therapie-Matratzen bei behinderten, kranken und pflegebedürftigen Menschen.



### Forschung

...in enger Zusammenarbeit mit vielen Experten aus der Pflegepraxis hilft uns bei der Lösung der Probleme des täglichen Lebens.



## Technologien

... aus vielen Fachbereichen machen die Therapie-Matratzen zu leistungsfähigen Produkten. Die mehr leisten als der übliche Standard.



## Professionelle Pflege

... setzt auf den Einsatz von Therapie-Matratzen. In vielen Einrichtungen gehört die Verwendung von Therapie-Matratzen zum täglichen Standard. Dies bestätigt die [www.Thevo-Liste.de](http://www.Thevo-Liste.de)



## Weltweit

... setzen Menschen auf unsere Ideen für ein immer größeres Stück Lebensqualität.

# Höchste Qualität zeichnet uns aus!




# Besserer Schlaf durch Therapie-Matratzen


Die Thevo Therapie-Matratze verwandelt feinste Regungen des Schlafenden – sogar seine Atembewegungen – automatisch in mikrofeine Gegenbewegungen.

Diese MiS Micro-Stimulation® sorgt dafür, dass der Mensch seinen Körper besser fühlt und wahrnimmt. Diese Wahrnehmung wiederum ist die Bedingung dafür, dass Blutzirkulation und Bewegung erhalten und gefördert werden.

Besonders bei Menschen mit alters- oder krankheitsbedingten Bewegungseinschränkungen bildet dies die Basis für einen erholsamen Schlaf.

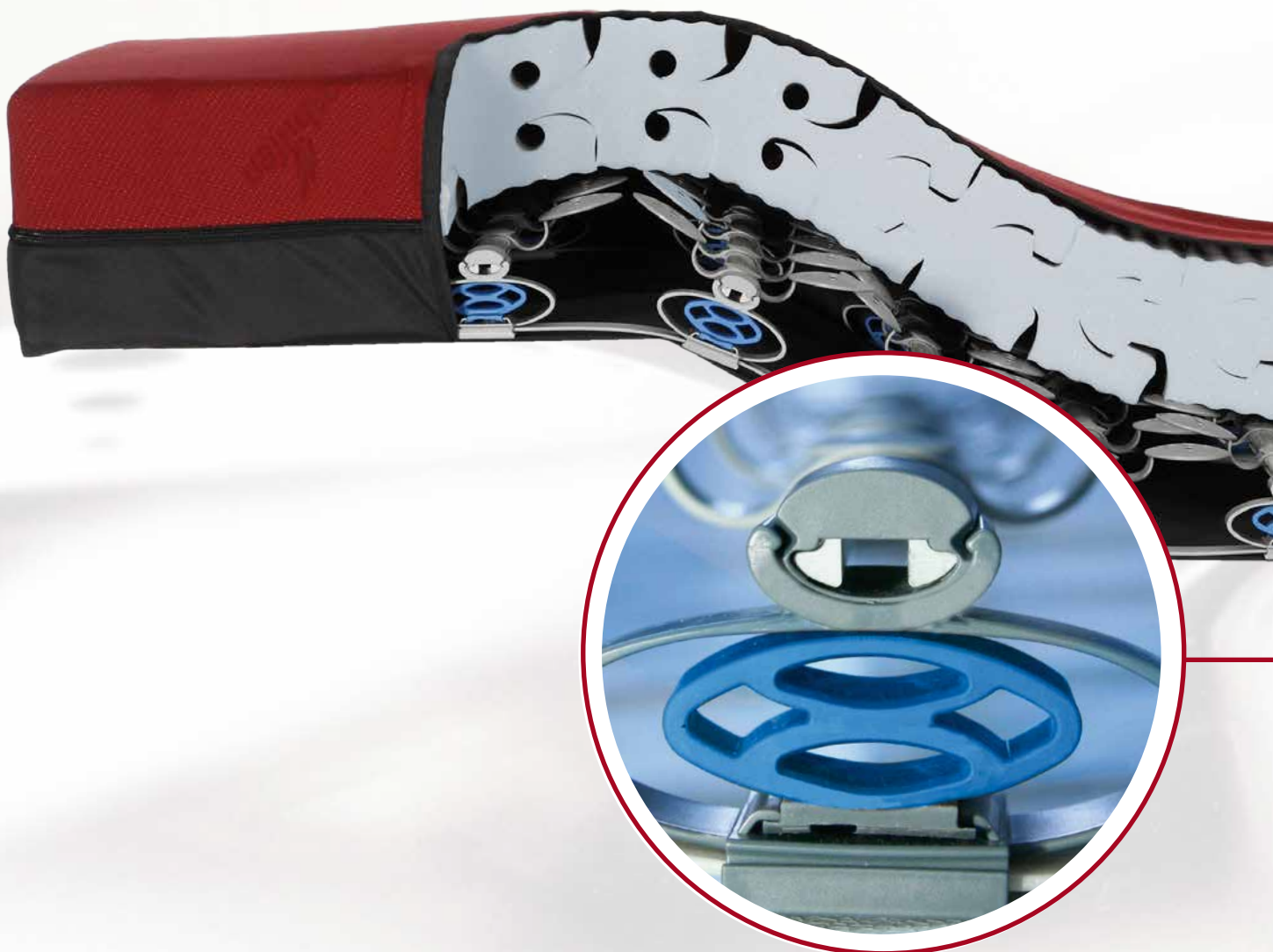



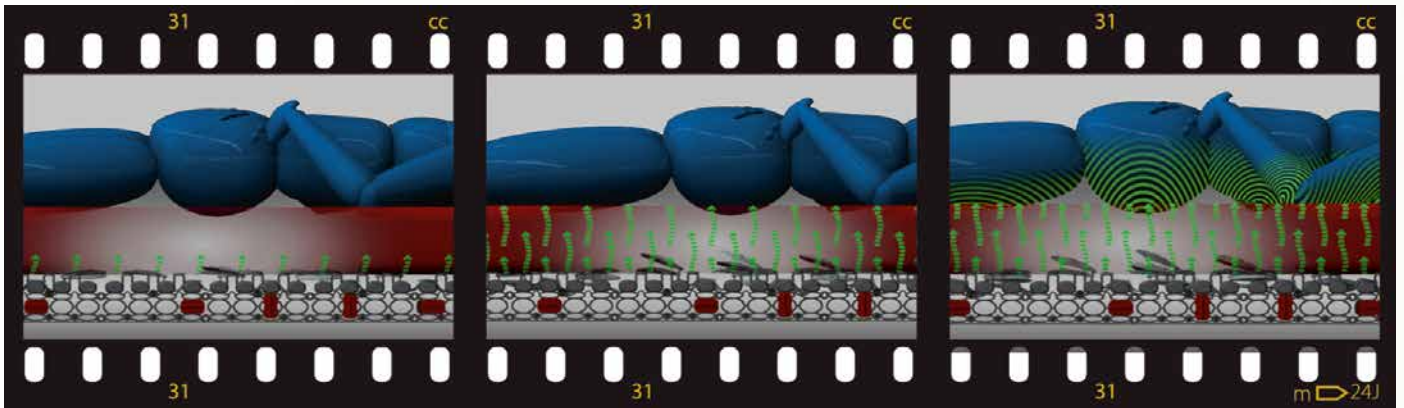


***Die Matratze allein kann es nicht leisten:***

***Das Federungssystem der Thevo Therapie-Matratze macht den Unterschied. Die einzigartige Technologie der integrierten MiS Micro-Stimulation® ist der Schlüssel zu besserem Schlaf.***

# ThevoVital – Die Therapie-Matratze

# **Demenz-Matratze**

*Mehr als zwei Drittel der Demenzkranken leiden unter massiven Schlafstörungen. Dadurch erhöht sich der Pflege- und Betreuungsaufwand immens. Medikamente werden häufig als einziger Ausweg gesehen.*



*„Unser Vater ist jetzt viel ruhiger und schläft endlich wieder besser. Deswegen habe ich mir die Kosten für die Demenz-Matratze mit meiner Mutter geteilt. Es geht schließlich um die Gesundheit meines Vaters – und die der ganzen Familie.“*






## Matratze

feste Eigenschaften sorgen für ein hervorragendes Liegegefühl



## Flügelfedern

passen sich individuell an die Körperzonen an, verbessern die Körperwahrnehmung durch MiS Micro-Stimulation®

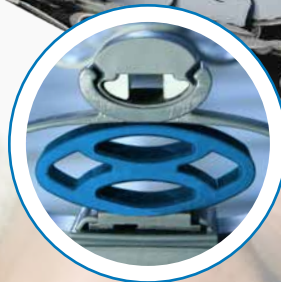

## Demenz-Federung

festes Liegegefühl → gute Orientierung

ist optimal auf die Schlaf- und Liegebedürfnisse der Demenzkranken abgestimmt

Ausgezeichnet von:



[www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)

## Besserer Schlaf mit der Demenz-Matratze

- ✓ weniger Umherwandern in der Nacht
- ✓ Entlastung der Pflegenden
- ✓ Betroffener ist ausgeschlafener und ausgeglichener am Tag
- ✓ Reduktion von Beruhigungsmitteln → weniger Nebenwirkungen

# ThevoCalm – Die Therapie-Matratze

# Parkinson-Matratze


*Die Wissenschaft belegt, dass an Parkinson erkrankte Menschen häufig unter Schlafstörungen leiden. Bewegungseinschränkungen führen zu Schlaflosigkeit und Verspannungen.*



***„Endlich schlafe ich tief und wache ohne Schmerzen auf. Wie unschätzbar der Unterschied ist, merkte ich erst, als ich nach dem Test für eine Nacht auf meiner alten Matratze schlief – was für Schmerzen!“***

*Shay Healy, irischer Songwriter, Irland (Foto links)*



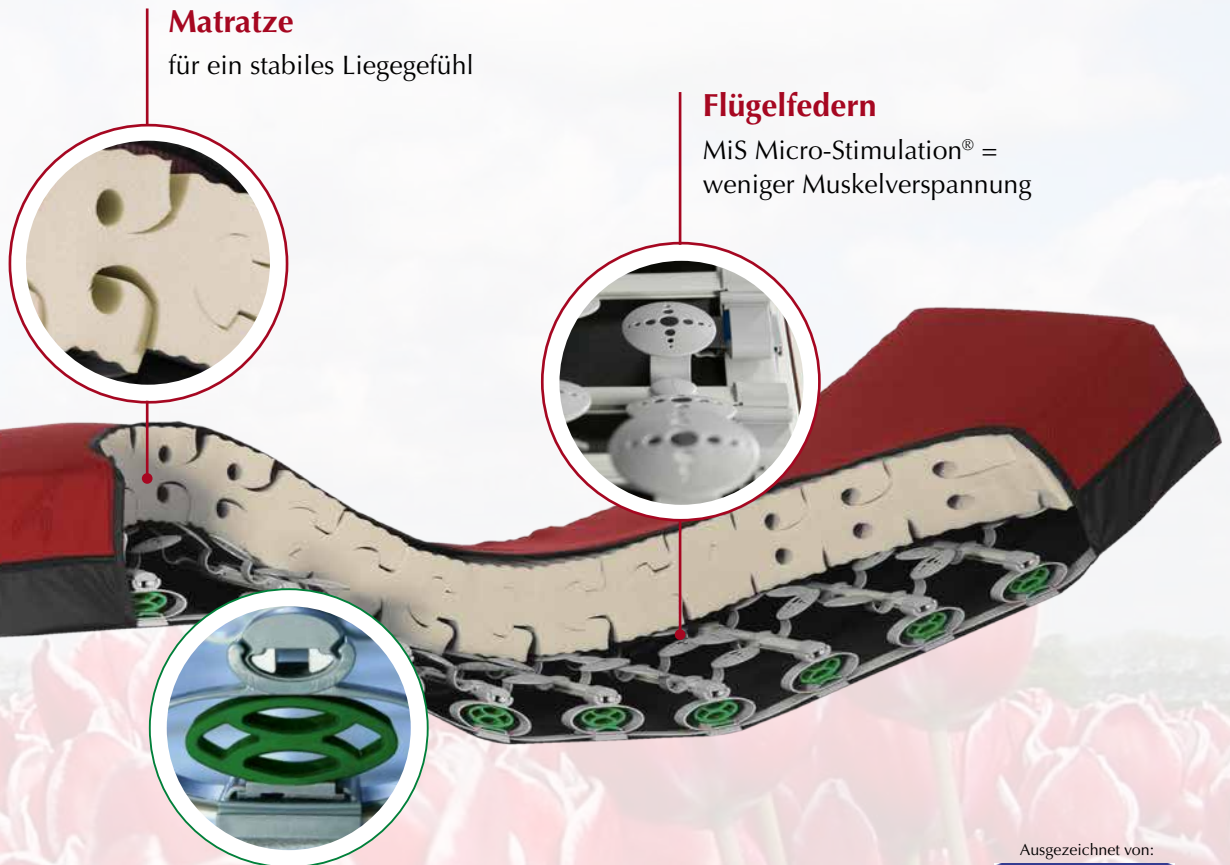

## Matratze

für ein stabiles Liegegefühl

## Flügelfedern

MiS Micro-Stimulation® =  
weniger Muskelverspannung

## Parkinson-Federung

sehr festes Liegegefühl → mehr Stabilität

ist optimal an die Schlaf- und Liege-  
bedürfnisse des Parkinson-  
Erkrankten angepasst

Ausgezeichnet von:



[www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)



## Besserer Schlaf mit der Parkinson-Matratze

- ✓ leichteres Aufrichten
- ✓ einfacher Positionswechsel
- ✓ Muskelentspannung = Schmerzreduktion
- ✓ Eigenbewegungen werden (durch Bewegungsimpulse) gefördert

# ThevoRelief – Die Therapie-Matratze

# Schmerz-Matratze

*Menschen mit Arthrose, Osteoporose oder Krebs leiden häufig unter starken Liegeschmerzen. Schlafstörungen sind die Folge. Das Immunsystem wird geschwächt.*

***„Meine Schmerzen sind endlich wieder erträglich! Die Anti-Schmerz-Matratze reduziert den Druckschmerz. Ich möchte auf meine Matratze nicht mehr verzichten.“***

*Michaela Strotmann, Berlin*




## Flügelfedern

Anpassung an die Körperkonturen,  
entlastet schmerzende  
Körperzonen



## Matratze

für ein extra weiches  
Liegegefühl

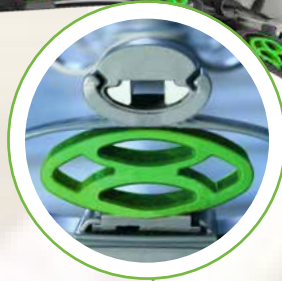

## Schmerz-Federung

sehr weiches Liegegefühl → Schmerzlinderung

ist optimal an die Schlaf- und Liege-  
bedürfnisse des Schmerz-Patienten  
angepasst

Ausgezeichnet von:



[www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)

## Besserer Schlaf mit der Schmerz-Matratze

- ✓ weniger Liegeschmerzen
- ✓ Entlastung schmerzhafter Körperstellen
- ✓ Reduktion von Schmerzmitteln und deren Nebenwirkungen
- ✓ Ausgeschlafener – bessere Tagesform



## Thevo800 – Der Allrounder


# Dekubitus / Schmerz / Palliativ

Besonders abgestimmt auf die vielfältigen Anforderungen der stationären Pflege (Schmerztherapie, Dekubitustherapie, Palliativ-Versorgungen), bietet die Thevo800 eine sehr große Einsatzbreite. Die Einheit aus Unterfederung und Matratze sorgt dafür, dass der Patient weich und bewegt zugleich liegt.

*„Die Kernthemen der Palliativ-Pflege sind die Schmerztherapie, das korrekte Liegen und Lagern sowie die menschenwürdige Pflege.*


*All diese Anforderungen erfüllt der Allrounder.“*

*Jeanette Ehlers ist Krankenschwester, Palliative Care Fachkraft und Koordinatorin des Gifhorner Palliativ und Hospiz-Netz e.V.  
info@palliativnetz-gifhorn.de*

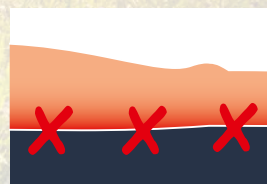

Weichlagerungs-Systeme

Thevo verschluckt die Körperbewegungen nicht wie ein herkömmliches Weichlagerungs-System.

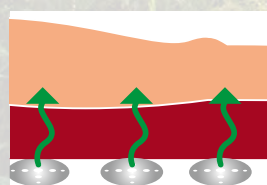

Systeme mit Mikrostimulation

Thevo fördert die Wahrnehmung und der Betroffene verliert diese nicht wie auf einem Wechseldrucksystem.



## Matratze

spezielle Luftkanäle, die beim Schnitt der einzelnen Matratzen-schichten entstehen, sorgen für einen weichen Liegekomfort und eine optimale Belüftung der Haut



## Flügelfedern

sie nehmen kleinste Bewegungen auf und geben diese an den Patienten zurück



## Dekubitus-Federung

weiches Liegegefühl → optimale Druckverteilung

Optimale Dekubitus-Prophylaxe und -therapie durch speziell aufeinander abgestimmte Komponenten

Ausgezeichnet von:



[www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)

## Professionelle Pflege mit der Allround-Therapie-Matratze

- ✓ Sicherheit für die Pflege durch 3-in-1 System
- ✓ Risikominimierung
- ✓ Dekubitus-Prophylaxe und -Therapie (bis Grad III)
- ✓ schnell einsetzbar, einfache Bedienung

# ThevoCare – Therapie-Matratze

# Residenz-Matratze

*Die Residenz-Matratze wird höchsten Ansprüchen von Menschen im fortgeschrittenen Alter gerecht und bietet zudem einen optimalen Liegekomfort.*

*Die Flügelfedern im Inneren der Matratze nehmen auch kleinste Bewegungen auf und geben sie sanft an den Liegenden zurück, er schläft weich und bewegt zugleich.*

***„In unseren Einrichtungen setzen wir auf hochwertige Qualitäts-Produkte.***

***Denn unsere Bewohner sollen auf die hohe Lebensqualität auch in diesem Lebensabschnitt nicht verzichten. Das haben sie sich über Jahre verdient! Diesen Luxus gönnen wir unseren Bewohnern.“***

*Petra Hecht, Senioren-Domizile  
Unternehmensgruppe Hecht*







**Bezug**

atmungsaktiv und leicht zu reinigen

**Matratze**

sorgt durch die feine Wellenstruktur für ein äußerst angenehmes Liegegefühl und bietet ein gutes Bettklima

**Flügelfedern**

in der Matratze komfortabel eingebettet, sorgen für ein bewegtes Liegen durch MiS Micro-Stimulation®

**Materialien**

robuste und langlebige Bauteile aus High-Tech-Material

Ausgezeichnet von:



[www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)

**Der beste Schlaf mit der Residenz-Matratze**

- ✓ Dekubitus-Prophylaxe, Therapiebereich bis Grad I
- ✓ bester Liegekomfort / Ausstattung auf höchstem Niveau
- ✓ 10 Jahre Garantie – beste Qualität

# ThevoautoActiv – Therapie-Matratze Dekubitus-Matratze

Viele Pflegebedürftige leiden unter einem Druckgeschwür (Dekubitus).  
Auf herkömmlichen Lagerungssystemen liegen die Patienten zu hart oder zu weich  
und können sich nicht ausreichend bewegen.



**Flexibles  
Seitenelement**  
integrierbar in jedes  
Pflege- bzw. Klinikbett

## Matratze

spezielle Luftkanäle, die beim Schnitt der  
einzelnen Matratzenschichten entstehen,  
sorgen für einen weichen Liegekomfort und  
eine optimale Belüftung der Haut



## Flügelfedern

nehmen kleinste  
Bewegungen auf und  
geben diese an den  
Patienten zurück



## Dekubitus-Federung

variables Liegegefühl → individuelle Anpassung

durch die verschiedenen Einstellmöglich-  
keiten der Adaptoren können je nach  
Bedarf die gefährdeten Körperpartien  
entlastet werden



*„Eigentlich ist es ganz einfach:  
Neben der sorgfältigen Umlagerung  
ist die Dekubitus-Matratze mit der  
MiS Micro-Stimulation® die beste  
Methode gegen das Wundliegen der  
Pflegebedürftigen.“*



Ausgezeichnet von:



[www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)

## Professionelle Pflege mit der Dekubitus-Matratze

- ✓ der Pflegebedürftige liegt weich und bewegt zugleich
- ✓ Dekubitus-Prophylaxe und -Therapie (bis Grad III)
- ✓ gleichmäßige Druckverteilung, verlängerte Lagerungsintervalle
- ✓ keine Kontraindikationen
- ✓ orientiert sich am nationalen Expertenstandard
- ✓ Listung im deutschen Hilfsmittelverzeichnis




## ThevoActiv – Therapie-Matratze

# Dekubitus-Aktiv-Matratze

Wenn ein Dekubitus bereits entstanden ist, gestaltet sich die Wundbehandlung oft sehr schwierig. Sehr pflegebedürftige Patienten sind häufig durch ihren gesundheitlichen Zustand nicht mehr in der Lage dem Druckschmerz durch Eigenbewegungen auszuweichen. Sie benötigen zusätzliche Bewegungsimpulse.



***„Wir verwenden ThevoActiv für die Dekubitusprophylaxe und -therapie bis Stadium IV. Die Erfolge spiegeln ebenfalls die Ergebnisse von zahlreichen klinischen Erprobungen sowie wissenschaftlichen Studien wider.“***

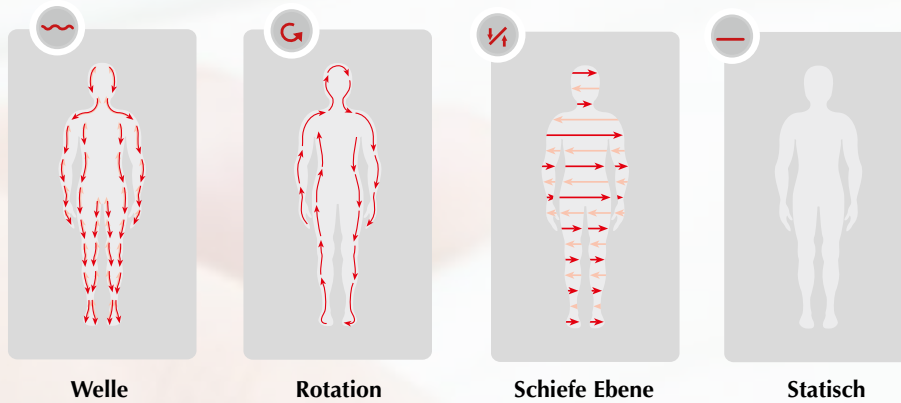

Welle

Rotation

Schiefe Ebene

Statisch

## Aktive Bewegungen

über eine einfache Menüauswahl können verschiedene Bewegungsprogramme ausgewählt werden. So kann der Patient individuell stimuliert werden, ohne laute Geräusche!



## Flügelfedern

geben aktive Bewegungen an den Patienten weiter

Ausgezeichnet von:



[www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)

## Professionelle Pflege mit der Dekubitus-Aktiv-Matratze

- ✓ geeignet für Hochrisiko- und Komapatienten
- ✓ Spastiken und Kontrakturen werden gemildert
- ✓ Förderung der Eigenbewegung durch MiS Micro-Stimulation®
- ✓ Listung im deutschen Hilfsmittelverzeichnis

## ThevoFlex – Therapie-Matratze

# Rollstuhlfahrer-Matratze

Die Rollstuhlfahrer benötigen eine optimale Kombination aus einer druckentlastenden Matratze und einer festen Unterlage zur Erleichterung des Transfers.

Durch die Rollstuhlfahrer-Matratze werden endlich beide Eigenschaften kombiniert.

### Randbalken

erleichtert den Transfer und gibt der Person ausreichend Halt und Stabilität




### Matratze

hervorragende Ergonomie für ein entspannendes und komfortables Liegegefühl



### Federelement extra weich

Druckentlastung des Unterkörpers

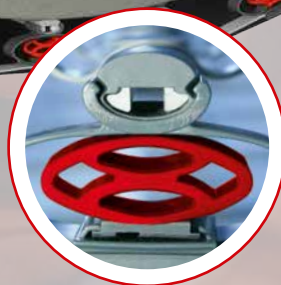

### Rollstuhlfahrer-Federung

festes Liegegefühl → Entlastung der Wirbelsäule

ist optimal an die Schlaf- und Liegebedürfnisse des Rollstuhlfahrers angepasst





*Es liegt sich ausgezeichnet auf der Matratze. Ich schlafe sehr gut, endlich nicht mehr nur wenige Stunden und wache erholt am Morgen auf ohne Rückenschmerzen. Das ist für mich nicht selbstverständlich.*

*Andrea Schütt, Korntal-Münchingen*

## Besserer Schlaf mit der Rollstuhlfahrer-Matratze

- ✓ optimale Druckentlastung
- ✓ spastische Bewegungen werden verringert
- ✓ Anpassung an die Wirbelsäule
- ✓ Rückenschmerzen können verringert werden

Ausgezeichnet von:



[www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)



# ThevoSchlummerstern – Therapie-Matratze für Kinder

# Lagerungs-Matratze

*Kinder mit stark beeinträchtigter Mobilität leiden häufig unter Schlafstörungen. In den Nächten sind sie sehr unruhig, wachen häufig auf oder müssen nachts z.B. aufgrund von Schmerzen und Rötungen umgelagert werden. Für Eltern und Kind hat dies einen schlechten Tag-Nacht-Rhythmus bis hin zum Schlafentzug zur Folge.*

## Flügelfedern

nehmen kleinste Bewegungen auf und geben diese an das Kind zurück

## Matratze

aus unbedenklichen Materialien, speziell auf die Bedürfnisse von besonderen Kindern abgestimmt

## Flexibles Seitenelement

kann in jedes Kinder- bzw. Therapiebett integriert werden



## Lagerungs-Federung

variables Liegegefühl → individuelle Anpassung

durch verschiedene Einstellmöglichkeiten können je nach Bedarf des Kindes, die von Druckstellen gefährdeten Körperpartien entlastet werden

Ausgezeichnet von:



[www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)





*„Jede Nacht habe ich Timo umgelagert,  
jetzt kann er sich ohne meine Hilfe  
eigenständig im Schlaf umdrehen.“*

*Timo geht es nachts und am Tage mit dem  
Schlummerstern deutlich besser !“*

*Anja Harms, Aurich*



## **Besserer Schlaf mit der Lagerungs-Matratze**

- ✓ Spastizität und Schmerzen werden verringert
- ✓ Förderung der Eigenbewegung durch MiS Micro-Stimulation®
- ✓ beugt Druckstellen (Dekubitus) vor
- ✓ weniger Umlagerung notwendig
- ✓ ruhiger und erholsamer Schlaf



ThevoSchlummerstern Senso – Therapie-Matratze für Kinder

# Durchschlaf-Matratze

*Kinder mit Wahrnehmungs- oder Verhaltensstörungen (z.B. ADHS, Autismus) können oft nicht schlafen und wachen während der Nacht sehr häufig auf. Die gesamte Familie leidet unter den Schlafstörungen des Kindes, dieses kann bis zum jahrelangen Schlafentzug der Eltern führen.*

## Matratze

für ein äußerst angenehmes Liegegefühl speziell auf die Bedürfnisse von Kindern abgestimmt

## Flügelfedern

beeinflussen durch minimale Bewegungsimpulse das unruhige Schlafverhalten des Kindes positiv

## Bezug

abnehmbar und leicht zu reinigen für eine bestmögliche Hygiene



## Durchschlaf-Federung

weiches Liegegefühl → verlängerte Schlafphasen

ist optimal an die Schlaf- und Liegebedürfnisse der aktiven Kinder angepasst



*„Seitdem unser Kind auf der Durchschlaf-Matratze schläft, wacht es nachts viel seltener auf und ist tagsüber viel entspannter und ausgeglichener. Dank der MiS Micro-Stimulation® – und das alles ganz ohne Nebenwirkungen!“*

Ausgezeichnet von:



[www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)

## **Besserer Schlaf mit der Durchschlaf-Matratze**

- ✓ verbesserte Schlafqualität
- ✓ positive Beeinflussung der Konzentrations- und Leistungsfähigkeit
- ✓ Verbesserung der Wahrnehmung und des Wohlbefindens
- ✓ Förderung der Ausgeglichenheit und Ruhe

 Besuchen Sie uns

# ThevoSchlummerstern A – Therapie-Matratze für Kinder **Lagerungs-Aktiv-Matratze**

*Sehr immobile Kinder oder Kinder im Wachkoma benötigen zusätzliche Bewegungsimpulse. Durch das ausgewogene Verhältnis zwischen Entspannung und Bewegung wird ein erholsamer Schlaf ermöglicht. Zusätzlich wird die Gefahr von Druckstellen minimiert.*




***„Wir haben die Lagerungs-Matratze erstmals in der Kinderklinik schätzen gelernt. Nun haben wir sie auch für Zuhause bekommen. Jetzt geht es uns allen viel besser.“***






## Aktive Bewegungen


über eine einfache Menüauswahl können verschiedene Bewegungsprogramme ausgewählt werden. So kann das Kind individuell stimuliert werden, ohne schlafstörende Geräusche!

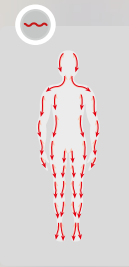


Welle

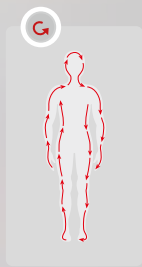

Rotation

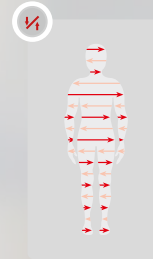

Schiefe Ebene

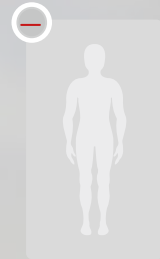

Statisch



## Flügelfedern

nehmen kleinste Bewegungen auf und geben diese an das Kind zurück

## Besserer Schlaf mit der Lagerungs-Aktiv-Matratze

- ✓ optimale Druckentlastung und Lagerung
- ✓ besonders geeignet zur Schmerztherapie und für Kinder im Wachkoma
- ✓ zusätzliche Bewegungsimpulse für immobile Kinder
- ✓ bessere Schlafqualität
- ✓ spastische Bewegungen werden verringert

# Sie haben die Wahl!

Die Thevo Therapie-Matratzen können wahlweise mit einem Jersey- oder Inkontinenz-Bezug genutzt werden und wahlweise für Einrichtung mit einem Thevo Rettungs-Gurt-System ausgestattet werden.\*1



## Maße: Thevo Therapie-Matratzen für Erwachsene

- **ThevoVital** • **ThevoCalm** • **ThevoRelief** • **ThevoCare**
- **ThevoFlex** • **Thevo800** • **ThevoautoActiv** • **ThevoActiv**

Die **Thevo** Therapie-Matratzen sind in einer Breite von 60 bis 120 cm\*2 und einer Länge von 170 bis 220 cm erhältlich.

Benötigen Sie Sondermaße? Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern! Weitere Informationen finden Sie in der Thevo Preis- & Maß-Übersicht.

\*1 erhältlich für **Thevo800**, **ThevoVital**, **ThevoRelief**, **ThevoCalm**, **ThevoFlex**, **ThevoCare** mit Inkontinenz-Bezug in Größe 90 x 200 cm.


\*2 **ThevoActiv** kann bis zu einer maximalen Breite von 120 cm gefertigt werden. **ThevoCare** kann in einer Breite von 80 bis 100 cm gefertigt werden. **ThevoVital**, **ThevoCalm**, **ThevoRelief**, **ThevoFlex**, **Thevo800** können mit Jersey-Bezug auch in einer Breite bis 160 cm gefertigt werden.







## Integriertes Rettungs-Gurt-System

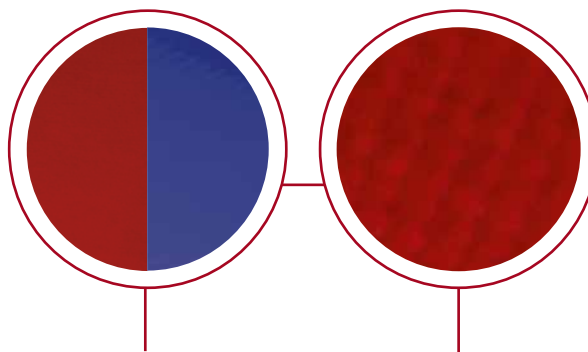

### Gemeinsame Eigenschaften:

- eingnähter Reißverschluss
- waschbar bei 65°C
- tumblerfest
- autoklavierbar
- für den Wiedereinsatz geeignet

### Eigenschaften

#### Inkontinenz-Bezug

- atmungsaktiv
- per Wischdesinfektion zu reinigen
- in Farbe blau für die Thevo Therapie-Matratzen für Kinder

### Eigenschaften

#### Jersey-Bezug

- sehr atmungsaktiv
- sehr gutes Mikroklima

## Maße: Thevo Therapie-Matratzen für Kinder

- **Thevo**Schlummerstern • **Thevo**Schlummerstern A
- **Thevo**Schlummerstern Senso

Die Thevo Therapie-Matratzen für Kinder sind in einer Breite von 60 bis 120 cm\* und einer Länge von 120 bis 220 cm erhältlich.

Benötigen Sie Sondermaße?  
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern!  
Weitere Informationen finden Sie in der  
Thevo Preis- & Maß-Übersicht.

\* **Thevo**Schlummerstern Senso kann mit Jersey-Bezug auch in einer Breite bis 160 cm gefertigt werden.

Technische Änderungen vorbehalten!

# AGR-Gütesiegel

## Was sagt das Siegel aus?

Eine wesentliche Ursache für Muskel- und Gelenkerkrankungen sind neben mangelnder Bewegung, Fehlhaltungen, einseitige Belastungen und Übergewicht auch unergonomische und somit rückenfeindliche Alltagsprodukte. Doch wie müssen Gebrauchsgegenstände gestaltet sein, die den Rücken entlasten und die Wirbelsäule unterstützen? Worauf muss der Verbraucher beim Kauf achten und wodurch werden Qualitätsunterschiede deutlich?

Um eine Antwort auf diese Frage zu erhalten, orientieren sich viele Menschen an sogenannten Güte- oder Prüfsiegeln. Diese halten jedoch vielfach nicht das was sie versprechen. Zu diesem Ergebnis kam bereits 2005 die Zeitschrift Ökotest, die über 250 bekannte Siegel unter die Lupe nahm. Erschreckende Bilanz: Viele dieser „Siegel“ wurden mit mangelhaft oder sogar ungenügend bewertet, da ein unabhängiges Prüfverfahren nicht stattfand.

Das AGR-Gütesiegel hingegen erhielt die Bestnote „sehr gut“ und ist somit eine verlässliche Entscheidungshilfe für Verbraucher.

„Das AGR-Gütesiegel ist ein seriöses und einzigartiges Qualitätsmerkmal bei ergonomischen und orthopädischen Alltagshilfen“, so Detlef Detjen, Vorstand der Aktion Gesunder Rücken e.V.

„Ausgezeichnet werden ausschließlich Produkte, die den strengen Prüfkriterien einer unabhängigen medizinischen/therapeutischen Expertenkommission genügen.“



Der Bundesverband „Die Verbraucher Initiative e. V.“ startete im Jahr 2000 mit dem Portal [www.label-online.de](http://www.label-online.de) und wurde seither mit Eigenmitteln und Mitteln des Bundesumweltministeriums, des Umweltbundesamtes und aktuell des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) stetig erweitert, um- und ausgebaut.

Vor kurzem wurde auch hier das AGR-Gütesiegel sehr kritisch unter die Lupe genommen und nun abschließend bewertet. Das Ergebnis: „Besonders empfehlenswert“ in allen Bewertungspunkten und im Gesamtergebnis. Im beigefügten PDF finden Sie weitere Informationen zur Bewertung des AGR-Gütesiegels.

***Alle unsere Schlafsysteme sind mit dem AGR Siegel ausgezeichnet!***





**Sie wünschen ein individuelles Angebot?**

Rufen rufen Sie uns an:

 **04761 8860**

oder

[info@thomashilfen.de](mailto:info@thomashilfen.de)



Walkmühlenstraße 1 · D - 27432 Bremervörde  
Telefon: 04761 8860 · Fax: 04761 886-19  
[www.thomashilfen.de](http://www.thomashilfen.de)